

ValMed · Engangstermometre til rektal måling


Engangstermometrene er en hygiejnisk, hurtig og meget præcis måde at måle kropstemperatur på. Da termometrene smides ud efter brug, reducerer det risikoen for smitte markant, og det er også en økonomisk løsning, da man undgår udgifter til desinfektion.

Termometeret hedder NexTemp Plus, og der medfølger et beskyttelseshylster til rektal måling. Termometeret nulstiller sig selv efter 20 sek.



Fordele:

- Termometeret er nemt at bruge. Til rektal måling anvendes beskyttelseshylstret uden på termometeret, og dette indføres i endetarmen til måleprikkerne ikke kan ses. Temperaturen kan aflæses efter tre minutter.
- Engangstermometeret er en praktisk og hygiejnisk løsning, da det kasseres efter brug.
- Om nødvendigt kan termometeret genbruges, da det nulstiller sig selv efter 20 sekunder. Funktionen sikrer, at man får en præcis og pålidelig måling, da termometeret ikke bliver påvirket af ydre faktorer som fx sollys.
- Målenøjagtigheden er på $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$, hvilket betyder, at engangstermometeret er lige så præcist som digitale termometre.
- Temperaturen måles i intervallet $35,5^{\circ}\text{C}$ til $40,4^{\circ}\text{C}$.
- Termometeret kan også bruges til oral måling. Dette gøres uden beskyttelseshylstret og foretages bagest i munden under tungen. Målingen kan aflæses efter 60 sekunder.

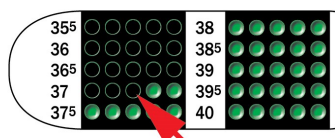

Last black dot
shows temperature
Example: 37.2°C

ValMed A/S er leverandør af kvalitetsprodukter inden for kategorierne graviditet/ barnepleje, initial første-hjælp, hudpleje og generel selvdiagnosticering. Vi leverer til den danske detailhandel, erhvervslivet og sygehusvæsenet.

ValMed står for kvalitet til fordelagtige priser.